




Alere Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo Interpretation Guide


Reactive/Preliminary Positive Results

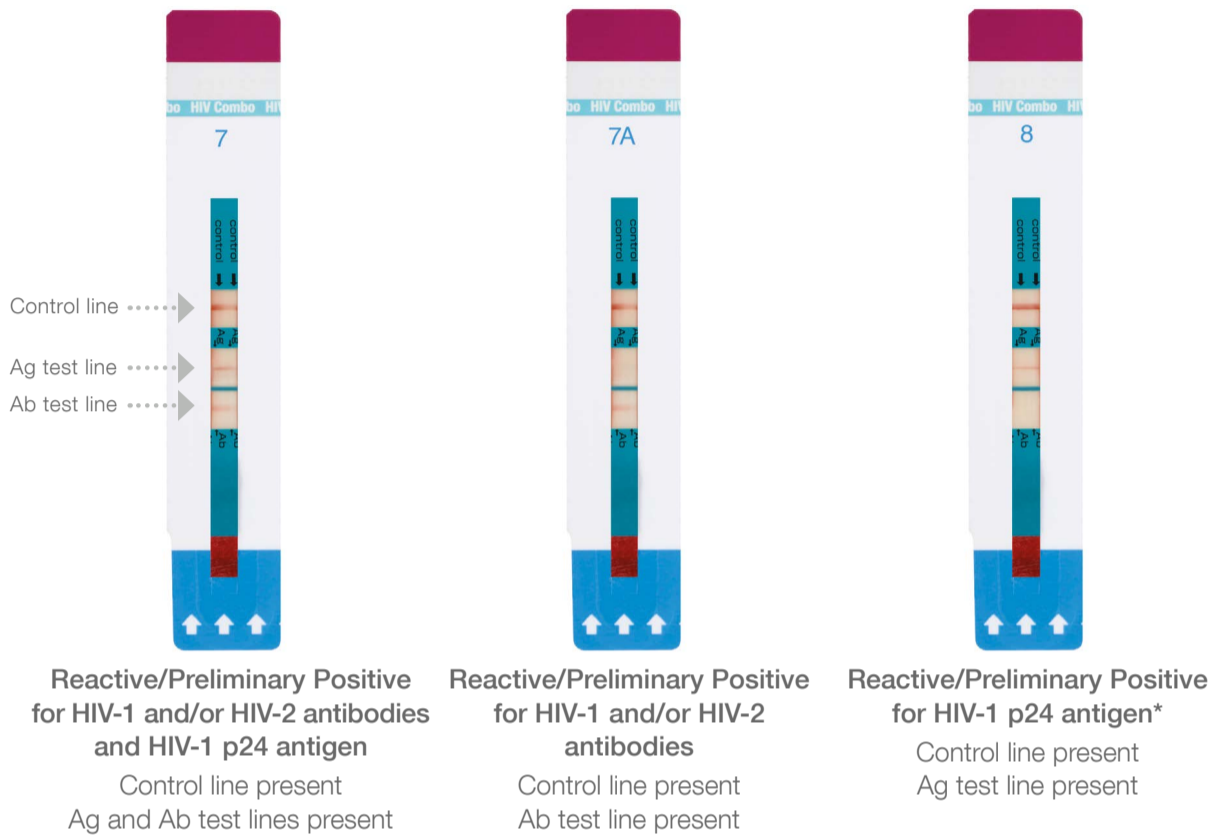

Nonreactive Result



Invalid Results

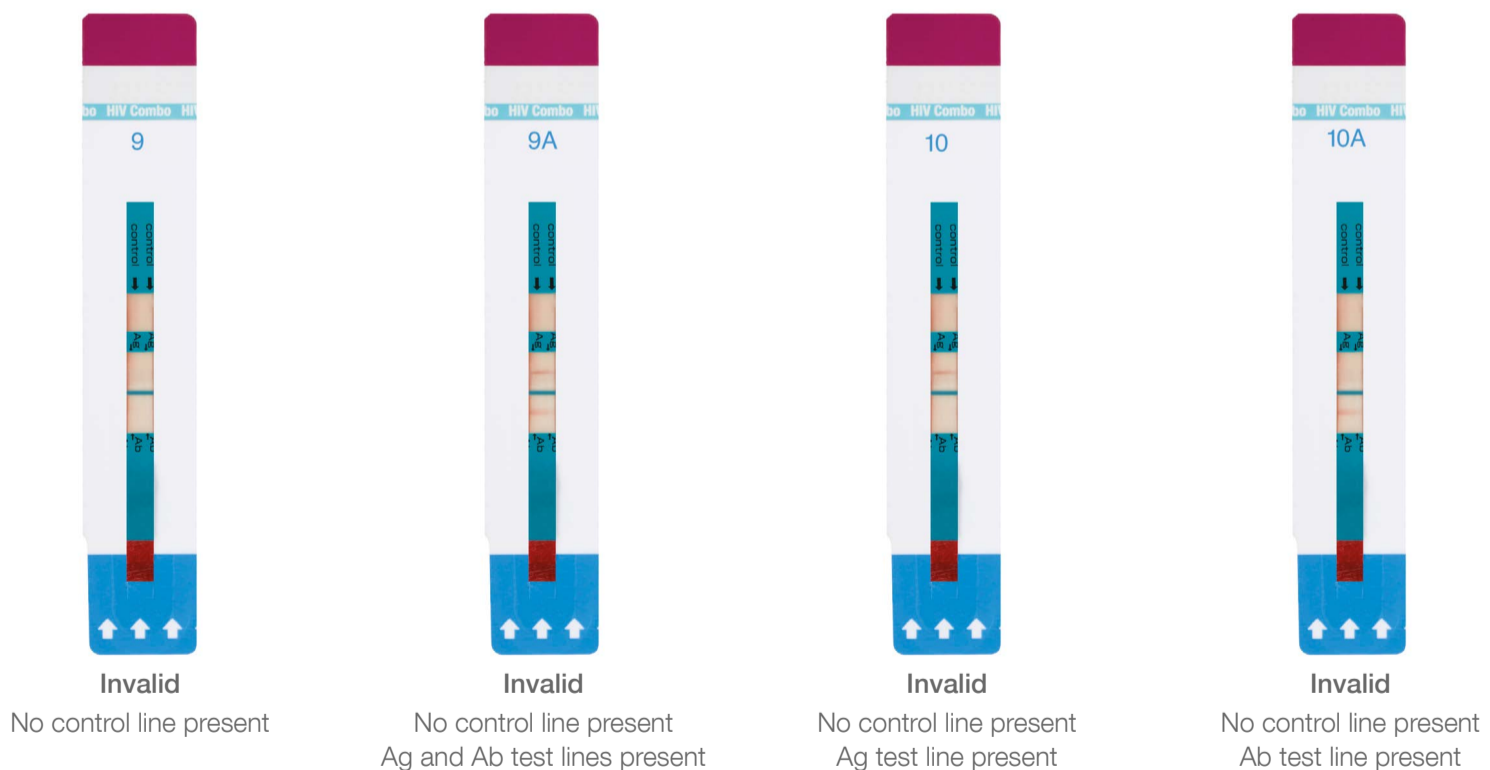

*NOTE: A test result that is REACTIVE/PRELIMINARY POSITIVE for HIV-1 p24 antigen in the absence of reactivity for HIV-1 or HIV-2 antibodies may indicate an acute HIV-1 infection in the test subject. In this case the acute HIV-1 infection is distinguished from an established HIV-1 infection in which antibodies to HIV-1 are present.

For technical assistance, please call 1.877.866.9335 or email ts.scr@alere.com

FOR INFORMATIONAL USE ONLY. Not to be used for performing the assay. Please refer to the package insert for more information.


© 2014 Alere. All rights reserved. The Alere Logo, Alere and Determine are trademarks of the Alere group of companies. 120001120-02 10/14



Alere Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo

Guía de interpretación

Resultados Reactivos/Positivos Preliminares

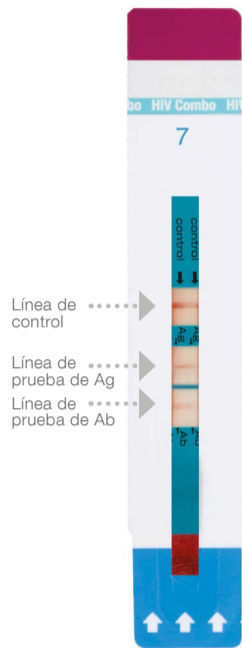

Reactivo/Positivo Preliminar a anticuerpos (Ab) contra VIH-1 y/o VIH-2 y al antígeno (Ag) p24 de VIH-1
Hay línea de control
Hay líneas de prueba de Ag y Ab



Reactivo/Positivo Preliminar a anticuerpos contra VIH-1 y/o VIH-2
Hay línea de control
Hay línea de prueba de Ab




Reactivo/Positivo Preliminar al antígeno p24 de VIH-1*
Hay línea de control
Hay línea de prueba de Ag

Resultado Sin Reacción



Sin Reacción
Hay línea de control
No hay líneas de prueba

Resultados No Válidos

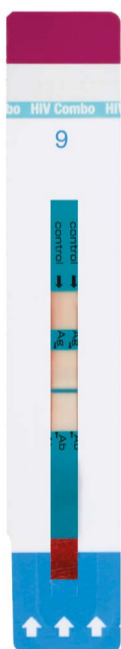

No Válido
No hay línea de control



No Válido
No hay línea de control
Hay líneas de prueba de Ag y Ab



No Válido
No hay línea de control
Hay línea de prueba de Ag



No Válido
No hay línea de control
Hay línea de prueba de Ab

*NOTA: Un resultado de prueba que es REACTIVO/POSITIVO PRELIMINAR al antígeno p24 de VIH-1, junto a una falta de reacción a los anticuerpos contra VIH-1 o VIH-2, puede indicar infección aguda por VIH-1 en la persona examinada. En ese caso la infección aguda por VIH-1 se distingue de una infección establecida por VIH-1, en la cual están presentes anticuerpos contra VIH-1.

Para obtener asistencia técnica, llame al 1.877.866.9335 o email ts.scr@alere.com

SOLO PARA USO INFORMATIVO. No debe utilizarse para realizar el ensayo. Consulte el prospecto del envase para obtener más información.

© 2014 Alere. Todos los derechos reservados. El logotipo de Alere, Alere y Determine son marcas comerciales del grupo de empresas Alere. 120001120E-02 10/14